

Säkerhetsåtgärd – uppdaterad 200907

SwiftHook (snabbkoppling) till mobillyft Vega

Bakgrund:

i februari 2020 uppmärksammade leverantören Handicare oss om att lyftbygel utrustad med SwiftHook (snabbkoppling) kan lossna från lyftarmen på mobila personlyften Vega. Detta kunde inträffa om SwiftHook inte var ordentligt fastsatt på lyftarmen och hamnar i ett instabilt läge (se fig. 1).

Snabbkopplingen, SwiftHook, satt som standard på mobillyft Vega 505 EE. Inga incidenter har inrapporterats i Norrbotten.



Figur 1. SwiftHook i instabilt läge

Nyläge och åtgärd:

- En skärpning av tidigare säkerhetsmeddelande har skett i juli 2020. Sedan tidigare åtgärd skulle Länservice montera bort SwiftHook från lyftarna vid den årliga besiktningen och vid rekond. NU gäller att snabbkopplingen ska monteras bort utan fördröjning! Detta kommer att ske av Länservice tekniker.
- [Säkerhetsmeddelande SwiftHook](#)
Utifrån detta måste du som förskrivare ta ansvar att läsa och informera vidare till de som hanterar lyften.
- Lyftarna levereras ut (fr.o.m. 2020-02-19) utan SwiftHook (snabbkoppling).
- SwiftHook har utgått från leverantörens sortiment. Det finns i dagsläget ingen annan lösning på att montera snabbkoppling på Vega 505 EE.

Vid frågor och funderingar är ni välkomna att höra av er till:

Lena Nordgren Hansson
Hjälpmiddelskonsulent, Länservice

[lena.nordgren-hansson@norrboten.se](mailto:lana.nordgren-hansson@norrboten.se)