

Swift Mobil

Duschstolens chassi har ett bockat rör som stöd för sitsens framkant och som även gör att sitsen inte kan släppa i bakkant och tippa framåt.

Denna bockning bidrar också till att hålla sitsen i rätt läge, så att den inte glider framåt.

Om man monterar sitsen för långt fram på stolen, utanför den bockade delen av chassit, så upphör ovan funktioner och man kan få en oönskad häv effekt som gör att sitsen lossnar i bakkant alternativt glider framåt.

Sitsen kan bara felmonteras om man har benstöden i nedersta läget eller om man inte har benstöden monterade.

Stolen levereras ut med benstöden omonterade (pga transporttekniska skäl).

**Kontrollera så att sitsen sitter korrekt och ligger an mot chassit.
(se fig. 1 nedan)**

Fig. 1 – **RÄTT** montering



Fig. 2- **FELAKTIG** montering
(I detta läge kan fotplattor ej monteras)

