

Säkerhetsåtgärd

Sorrento duschstol

**Bakgrund:**


Efter att Invacare fått inrapporterat flertalet tillbud där benens infästning under sitsen gav vika (benen veks utåt och stolen blev instabil), startades 2018 en säkerhetsåtgärd för att åtgärda briserna.

Åtgärd:


Från juli 2016 gjorde leverantör Invacare en förstärkning under sitsen på Sorrento.

Duschstolar som utlevererades efter det datumet har en förstärkt konstruktion och omfattades inte av säkerhetsåtgärden.

Alla duschstolar som inte hade denna förstärkning under sitsen skulle bytas ut (se bild nedan)

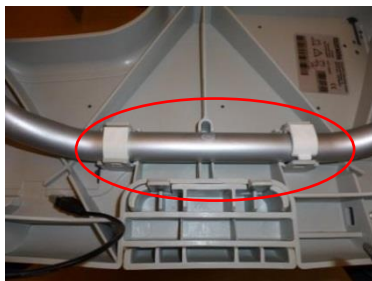

1a) "Gamla" benstödsinfästning på Sorrento – duschstolen ska bytas ut!

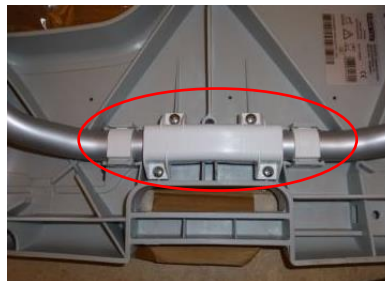

1b) Ny förstärkt benstödsinfästning på Sorrento – duschstolen ska inte bytas ut!

Nuläge from 2020-02-13:

Säkerhetsåtgärden har stängs från leverantörens sida, 31 december 2019.

Norrbottnen har under säkerhetsåtgärden nått en stor mängd av duschstolarna tack vare er förskrivare – **Tack för er insats, ni har gjort ett mycket bra jobb!**

Trots detta kan det fortfarande finnas duschstolar kvar att åtgärda.

Detta gäller framöver:

- Inga fler inrapporteringar ska göras till Länservice eftersom säkerhetsåtgärden från leverantören är avslutad.
- Hygienstolar som har den gamla benstödsinfästningen ska fortfarande bytas ut om de har försvagningen (se bild ovan) - Detta är viktigt med tanke på patientsäkerheten
- Skillnaden är att utbytesstolar inte längre tillhandahålls gratis. Verksamheterna måste beställa ny duschstol på vanligt vis i webSesam (förskriva den som finns i sortiment nu), byta ut och bekosta detta.